


# Diveen® – so einfach\*

Bevor Sie das Produkt verwenden waschen Sie bitte Ihre Hände und nehmen Sie eine bequeme Haltung ein.

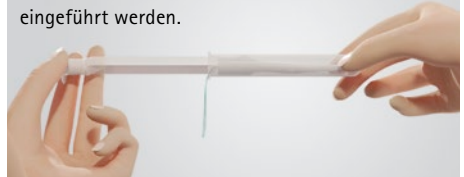


Setzen Sie den Schieber wieder zurück in das Applikatorröhrchen. Diveen® kann jetzt eingeführt werden.



Entfernen Sie den Schieber aus dem Applikatorröhrchen.



Führen Sie das Applikatorröhrchen in die Scheide ein. Nutzen Sie den Schieber, um das Produkt in die Scheide zu schieben (wie bei einem Tamponapplikator).

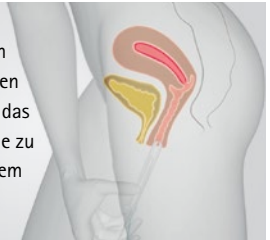

Drücken Sie sanft auf den Ring des Produkts.



Entfernen Sie den Applikator.



Führen Sie ihn in das Applikatorröhrchen ein.



**ENTFERNUNG**  
Ziehen Sie sanft am Rückholfaden.



\* Bitte lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Fragen Sie Ihren Arzt zum Umgang mit Ihrer Inkontinenz. Weitere Informationen und FAQs zu Diveen finden Sie auf unserer Homepage [www.bbraun.de/diveen](http://www.bbraun.de/diveen)